

## Bruksanvisning åndedrettsvern FFP3

### Modell: Q-Pro XE



Q-Pro XE Partikkel filtrerende halvmaske er designet for å beskytte mot både luftbårne partikler og væsker.

Produktet er klassifisert som personlig verneutstyr (PPE) etter EU PPE Regulativ 2016/425 og oppfyller kravene gjennom den harmoniserte europeiske standarden EN 149:2001+A1:2009 Åndedrettsvern.

**For å beskytte liv og helse, samt å unngå alvorlig skade eller død, er det viktig å LESE og FØLGE instruksjonen som er vedlagt produktet.**


#### **KONTROLL FØR BRUK**

- a. Sjekk at ikke utløpsdato for masken er passert: Se dato på masken
- b. Kontroller at masken er ren og at den ikke er påført noen skader.

#### **SETT MASKEN RIKTIG PÅ**

- a. Hold masken med metall nesestykket opp. La hodebåndene henge fritt.
- b. Plasser masken under kinnet, og over nese og munn.

- c. Dra båndene over hodet og plasser nederste hodebånd under ørene og øverste hodebånd over ørene.
- d. Hold hodebåndet sammen og trykk på justeringsklipsen.
- e. Juster hodebåndene ved å bevege justeringsklipsen frem og tilbake.
- f. Press inn nesestykket så det sitter godt rundt nesen.
- g. Kontroller tilpassingen ved å holde for åpningene med hendene og puste kraftig inn. Hvis det lekker inn luft, må du justere nesestykket og båndene til masken sitter tett mot ansiktet. Ikke utsett deg selv for forurensninger hvis masken ikke tetter godt.

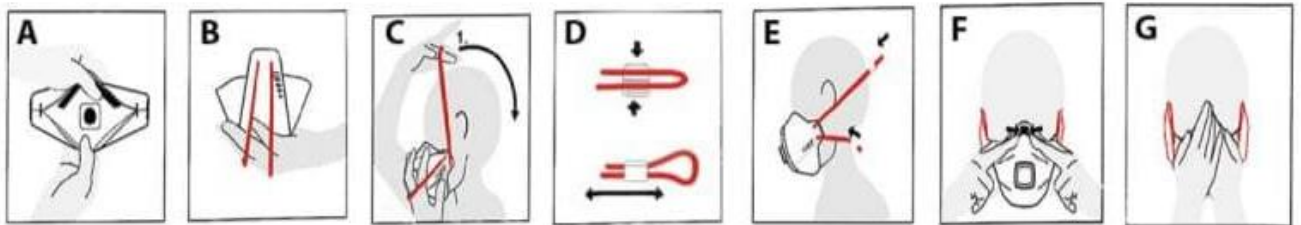

**Advarsel:** Man må ikke bruke masken og gå inn i forurensset område hvis man ikke kan oppnå riktig tilpassing av masken.

## ADVARSEL FØR BRUK

1. For engangsbruk
2. Må ikke brukes lengre enn 8 timer
3. Kastes etter bruk
4. Produktet må brukes i henhold til gjeldende regler for helse og sikkerhet.
5. Produktet gir ikke tilstrekkelig beskyttelse ved livsfarlig innhold av forurensende stoffer.
6. Ubrukte produkter må ikke utsettes for frost, direkte sollys, løsemidler eller kontakt med harde overflater eller gjenstander.
7. Brukes kun i godt ventilerte rom med god oksygentilgang.
8. Skift maske med en gang hvis det blir vanskelig å puste, hvis masken blir ødelagt eller skadet, eller hvis den ikke lenger passer til ansiktet.
9. Produktet må tilpasses riktig for å gi optimal beskyttelse. Ansiktshår kan føre til at masken ikke sitter tett nok.

11. Holdbarheten på masken gjelder ved oppbevaring i originalemballasje og lagret under forhold som anvist i instruksjonen.

**ADVARSEL:** Åndedrettsvernet bidrar til å beskytte mot forurenset luft. Den eliminerer ikke nødvendigvis risikoen for å få påført smitte eller infeksjoner. Feil bruk kan føre til sykdom eller død.

PRODUKT NAVN : Partikkel filtrerende halvmaske

MODELL : Q-Pro XE                      KLASSIFISERING: FFP3 NR

STØRRELSE : SAMMENFOLDET 21.5 x 7.6 cm (±0.5cm)

FFP3 NR definert i EN 149:2001+A1:2009

OPFYLLER EN STANDARD: EN 149:2001+A1:2009

#### PRODUSENT:

UNIQON Protection AS  
Hornelandsvegen 192, 5412 Stord  
NORGE

#### SERTIFISERT AV:

0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (ALLPLUS) C/ CAMPEZO Nº1 PARQUE EMPRESARIAL LAS MERCEDES, 28022, MADRID, MADRID, SPAIN

#### SYMBOL PÅ ESKEN

##### Symbol



##### Forklaring

Behandle varsomt



Oppbevares tørt



Unngå direkte sollys

##### Symbol



##### Forklaring

Grønt Punkt Norge



Masken sorteres som Restavfall



Maskeomslaget sorteres som plast



Se informasjon fra  
produsenten



Esken sorteres som papir

